

COUSSINETS PLANTAIRES à l'Epithelium 26®

INDICATIONS

Prévenir et soulager les douleurs sous l'avant-pied.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.
- Cas de personnes souffrant d'artérite, de diabète, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères variqueux : ne jamais utiliser le produit sur une plaie, surveiller le pied pendant l'utilisation et dans tous les cas demander conseil à votre médecin ou à votre podologue. La bretelle peut être une source de frottements entre les deux orteils. Il est donc recommandé aux diabétiques souffrant d'une neuropathie d'éviter cette solution.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Laver avant la 1^{ère} utilisation.
- Les porter à même la peau.
- La partie imprimée du tissu doit être en contact avec la plante du pied. Ne pas retourner.
- Glisser le pied dans le coussinet, placer la languette de retenue entre le gros orteil et le deuxième orteil.
- Pour un maintien optimal, ne pas les porter pieds nus mais avec un collant, des bas ou des chaussettes par-dessus.

FONCTIONNALITÉS

- Breveté par des podologues, l'Epithelium 26® est un véritable « substitut au capiton plantaire ». En effet, de par ses propriétés mécaniques, ce gel silicone remplace le capiton plantaire naturel défaillant à l'origine de douleurs : il répartit remarquablement le poids du corps sur l'ensemble de la zone d'appui.
- La présence d'Epithelium 26® en zone plantaire permet aux Coussinets Plantaire de limiter efficacement les douleurs.

ENTRETIEN

- Laver après utilisation en machine à 30°C dans le filet de lavage fourni ou à la main (sans frotter).
- Jeter et remplacer le dispositif dès l'apparition de dégradation du tissu ou des coutures.
- Laisser sécher naturellement. Ne pas repasser.

COMPOSITION : 80 % silicone, 20 % tissu polyamide/élasthanne.

En cas de douleurs ou de toute autre réaction inhabituelle, contacter votre médecin. Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de santé.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2001.



Lavable en machine à 30°C.



Pas de repassage, ni de vapeur.



Pas de nettoyage à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage en machine.



Voir emballage.



MILLET
INNOVATION



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Loriol/Drôme - FRANCE

contact@epitact.com
www.epitact.com